



1. Coloque el Chaleco por encima de la cabeza.



2. Asegure las Solapas de velcro ceñido al paciente.



3. Asegure que el cinturón de seguridad este ceñido al paciente. **NO UTILICE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O LA CORREA PARA TRANSFERIR AL PACIENTE.**



4. Los pies del paciente deben ponerse aproximadamente a la anchura de los hombros del paciente.



5. Ponga su rodilla entre las piernas del Paciente, mientras que la segunda pierna esta aproximadamente 2 pies directamente detrás del pie delantero.



6. Usando los Asideros ubicados en el área cercas de las clavículas y manteniendo la espalda recta, jale al paciente hacia usted y usando un ángulo de 90°.



7. La persona atendiendo al paciente transferirá su peso de la pierna de adelante hacia la pierna de atrás durante la transferencia del paciente minimizando el riesgo de lesionarse la espalda o los hombros a si mismo.



8. Una vez que el paciente está en una posición vertical, gire los pies del paciente para comenzar la próxima transferencia.



9. La persona atendiendo al paciente pondrá el pie delantero entre las piernas del paciente, mientras que la pierna de atrás esta directamente detrás del pie delantero.

ChooseTheVest.com

Elevando la calidad de vida para el paciente y los que los atienden.



10. Manteniendo la espalda recta, comience a apalancar su peso de nuevo al pie de adelante mientras que baja al paciente.



11. Anime al paciente a sostenerse de sus brazos o de agarrar los lados de la silla.



12. Todo el peso del que atiende al paciente ahora debe estar enteramente en el pie delantero a la vez manteniendo la espalda recta.



13. Para tamaños XL, use las correas de las piernas adheridas al chaleco con los sujetadores metálicos.



14. Ponga las correas alrededor de las piernas del paciente asegurandolas con el velcro puesto al fin de cada correa.



15. Una vez puestas las correas de las piernas, asegure las solapas del chaleco con el velcro.



16. Durante transferencias usando dos personas cada persona se pone al un lado del paciente. Usando las asideras el brazo delantero en al asidera cercas de la Clavícula y el brazo de atrás usando la asidera hacia la espalda.



17. Infórmele al paciente que es tiempo para transferirlo. Use un ángulo de 90°.



18. Jale al paciente hacia delante en donde la parte superior del torso está directamente bajo los pies del paciente.